

Nivåskillnad kan föreligga vid byte från Li-Heparinrör till serumrör:

Analyt	Rekommenderat provrör i VGR	Nivåskillnad i plasma jämfört serum	Ersättande provrör
ALAT	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Albumin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
ALP (Alkalisk fosfatas)	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Amylas	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Apolipoprotein A1	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Apolipoprotein B	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
ASAT	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 5 % högre resultat för plasma	Serum m gel (Guldgul)
Bilirubin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Bilirubin konjugerat	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Calcium	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
CK (Kreatinkinas)	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
CK-MB	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Uppgift saknas	Serum m gel (Guldgul)
C-peptid	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
CRP	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Cystatin C	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
D-vitamin 25-OH	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Etanol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Ferritin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 6 % högre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Folat	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 10 % högre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Fosfat	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
FSH	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Gamma-GT	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Gallsyror	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
HDL-kolesterol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Homocystein	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Uppgift saknas	Serum m gel (Guldgul)
IL-6	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Insulin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 5 - 10 % lägre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Järn	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Kalium	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 0,2 - 0,3 mmol/L lägre resultat i plasma. Separata referensintervall anges för serum resp. plasma	Serum m gel (Guldgul)

Klorid	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Kobalamin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Koldioxid	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Uppgift saknas	Serum m gel (Guldgul)
Kolesterol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Kortisol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Kreatinin, enzymat	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
LDL-kolesterol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
LH	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Magnesium	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Mononukleostest	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ej aktuellt	Serum m gel (Guldgul)
Myoglobin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Natrium	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 0,7 mmol/L lägre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
NT-proBNP	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Pankreasamylas	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Paracetamol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Uppgift saknas	Serum m gel (Guldgul)
Progesteron	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Prokalcitonin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Protein, total	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
SHBG	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 10 % lägre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
T3, fritt	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
T3, total	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
T4, fritt	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
T4, total	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
TSH	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 15 % högre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Testosteron	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 10 % lägre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Tobramycin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Får ej tas i serum	EDTA (Lila)
TPO-antikroppar	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Transferrin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Transferrinreceptor löslig	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Triglycerid	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Troponin I	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ingen säker nivåskillnad upp till 500 ng/L. Vid högre koncentrationer ses lägre nivåer i plasma.	Serum m gel (Guldgul)
Urat	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Urea	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)
Vankomycin	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Ca 10 % högre resultat i plasma	Serum m gel (Guldgul)
Östradiol	P (Li-heparin) (Ljusgrön)	Nej	Serum m gel (Guldgul)