

Senast reviderat: 2024-10-09

Dokumentet gäller för: Verksamhet Kardiologi

Innehållsansvarig: Sara Bentzel, Vårdenhetsöverläkare, VO Kardiologi

Akututrustning avdelning 93/92

Revideringar i denna version

Nytt innehåll tillagt i kontroll av akutväska "hjärtstoppgruppen" samt ny rutin för kontroll av självtest av zoll-deff. Förtydligande av kontroll av lådor i akutskåp.

Syfte

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och forskningsresultat. Att systematisera och effektivisera omvårdnadsarbetet och säkerställa patientens vård och omhändertagande på ett optimalt sätt, samt att minska risken att fel och brister uppstår samt att underlätta introduktionen av nya medarbetare.

Arbetsbeskrivning

KONTROLL AV DEFIBRILLATORER

- Yttre inspektion:
Kontrollera att höljet och kablarna är helt
Rengör vid behov med ytdesinfektion.
- Kontrollera att självtest är genomfört. Om rött kryss visas skall självtest genomföras.
- Elektroder:
Kontrollera att plattorna är kopplade på terapikabeln och ligger på vagnen samt att sladden inte är trasslad.
- Kontrollera lådans innehåll:
3st rakhyvlar
Arytmikabel
Elektroder
- Under vagnen:
2-5 defibrilleringsplattor, kontrollera bäst före-datum
1st pocketmask
1st liten handduk

Postadress:

Verksamhetsområde Kardiologi
Avd 92/93
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

KONTROLL AV LÄKEMEDELSVÄSKOR

Väska avd 92 och avd 93:

- Atropin 0,5 mg/ml, 2 ampuller à 1 ml
- Fenylefrin 0,1 mg/ml, 2 ampuller à 5 ml
- Adrenalin 0,1 mg/ml, 3 ampuller à 10 ml
- Cordarone 50 mg/ml, 3 ampuller à 3 ml
- Glukos 50 mg/ml, 1 st à 100 ml
- Natriumklorid 9 mg/ml, förfyllda sprutor x5

Sprutor:

- 2 st 5 ml
- 4 st 10 ml
- 1 st 20 ml
- Uppdragningskanyler, rosa x5
- Minispike, x1
- Ampullbrytare x5

Väska hjärtstoppgruppen

Läkemedel:

- Adrenalin förfylld 0,1mg/ml, 4 förfyllda sprutor á 10 ml
- Adrenalin 0,1 mg/ml, 4 glasampuller á 10 ml
- Amiodaron 50mg/ml, 4 ampuller á 3 ml
- Atropin 0,5mg/ml, 4 ampuller á 1 ml
- Fenylefrin 0,1 mg/ml, 3 ampuller á 1 ml
- Solu-Cortef 100 mg
- Glucos 50 mg/ml, 1 á 100 ml
- Natriumbikarbonat 50 mg/ml, 2 á 100 ml
- Förfylld-spruta NaCl, 7 st
- NaCl 0,9mg/ml, 3 st á 20 ml
- Addex-Kaliumklorid 2mmol/ml, 1 st á 20 ml
- Calciumgluconat 1 st, 10 ml
- Glucos 300mg/ml, 1 st á 10 ml

Sprutor:

- 20 ml, 2 st
- 10 ml, 6 st
- 3 ml, 3 st
- Uppdragningskanyl, 10 st
- Mini-spike, 2 st
- Injektionsmembran, 5 st
- Proppar, 5 st
- Kompresser, 10 st

Postadress:

Verksamhetsområde Kardiologi
Avd 92/93
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

- Aggregat fritt, 1 st

Infarter:

- Artärnål, 1 st
- Blodgas med kanyl, 2 st
- Grön pvk, 2 st
- Rosa pvk, 2 st
- Trevägskran, 1 st
- Tegaderm, 1 st
- Stickburk, 1 st

Extra:

- Stetoskop, 1 st
- Munskydd/handskar
- Pennos/post-it
- Tidtagarur

Yttre fack:

- Karta
- Arbetsblad

KONTROLL AV LÅDA FÖR URAKUT PERIKARDTAPPNING

Endast i akutskåpet på avd 93. Kontrollera lådans innehåll mot innehållsförteckningen i lådan.

KONTROLL AV LÅDA FÖR URAKUT PACEMAKERINLÄGGNING

Endast i akutskåpet på avd 93. Kontrollera lådans innehåll mot innehållsförteckningen i lådan.

KONTROLL AV LÅDA FÖR URAKUT PLEURATAPPNING

Endast i akutskåpet på avd 93. Kontrollera lådans innehåll mot innehållsförteckningen i lådan.

KONTROLL AV LÅDA FÖR URAKUT CVK-inläggning

Endast i akutskåpet på avd 93. Kontrollera lådans innehåll mot innehållsförteckningen i lådan.

KONTROLL AV LÅDA FÖR CPAP och esofagus-EKG

Utanför läkarexpeditionerna vid HIA på avd 93 och 92. Kontrollera lådornas innehåll mot innehållsförteckningen i lådorna.

Kontroll av elkonverteringslåda samt artärnålslåda i läkemedelsrum avd 93

Postadress:

Verksamhetsområde Kardiologi
Avd 92/93
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten ansvarig för att rutinen är känd och följs. Den sjuksköterska eller läkare som utför arbetsuppgiften är själva ansvariga för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska rapporteras avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har avdelningens rutinansvariga sjuksköterska tillsammans med vårdenhetschefen

Granskare/arbetsgrupp

Mattias Broström - Sektionsledare, Sjuksköterska, VO Kardiologi Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Gustav Haglunds Eriksson- Sjuksköterska, VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Johan Karlsson - Sjuksköterska, VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marcus Gustafsson - Sjuksköterska, VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sara Bentzel- Vårdenhetsöverläkare VO kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Postadress:

Verksamhetsområde Kardiologi
Avd 92/93
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se