

## Underhållsschema DCA Vantage

Anvisning

Inrättning: ..... År: .....

Åtgärd	Tillvägagångssätt	Datum och signatur					
<b>Varje månad</b>							
<b>Rengör streckkodsläsarens fönster och torka av instrumentets utsida</b>	Innan du rengör streckkodsläsarfönstret, stäng av instrumentet och ta ur nätkabeln. 1. Använd en luddfri torkduk fuktad med vatten eller etanol för att rengöra streckkodsläsarfönstret. Torka även av ut och insidan av instrumentet från stänk av reagens. Rengör området runt kassettfacket. Torka rent i rännan, 2. När fönstret är rengjort och torrt kan du ansluta nätkabeln igen.						
<b>Varje kvartal</b>							
<b>Ta bort och rengör kassett-fjäders och kassettområdet.</b>	Innan du rengör kassettfjäders och kassettområdet, stäng av instrumentet och ta ur nätkabeln. Se anvisningar i Användarhandboken – Underhåll kapitel 6.						
<b>Byta luftfilter</b>	Ta ut filterhållaren på instrumentets baksida. Kontrollera om filtret är rent. Om filtret är smutsigt, tag bort det gamla och placera ett nytt filter i hållaren. Sätt tillbaka filterhållaren.						
<b>Optiskt test</b>	Dra den optiska testkassetten genom streckkodsläsaren. Följ instruktionerna på skärmen: Öppna luckan på kassettfacket och sätt i testkassetten. Streckkoden skall vara på höger sida. Stäng luckan. Efter 6 min visas slutresultatet. Anteckna dessa på Protokoll för "Optisk PD-test" DCA Vantage. Bedöm om resultaten är godkända. Ta ur testkassetten på vanligt sätt. Se anvisningar i Användarhandboken – Underhåll kapitel 6.						
<b>Vid behov</b> Om en kassett gått sönder i kassettfacket kontakta instruktör på Regional laboratoriemedicin Klinisk kemi NÄL.							