

## Underhållsschema Centrifuger i primärvård

Anvisning

Inrättning: .....Centrifug (namn/typ).....År: .....

**Underhåll utförs var 3:e månad samt däremellan vid behov**

Åtgärd	Tillvägagångssätt	Datum och signatur					
<b>Varje 3:e månad</b>							
Rengöring av bägare och insatser	OBS! Handdiska bägare och insatser i varmt vatten och handdiskmedel.						
Kontroll av bägare, rotor och gummiplatta	Kontrollera så att det inte finns sprickor i materialet.						
Avtorkning av rotor-kammare samt utvändigt på centrifugen	Torka kammaren samt lockets in och utsida med pappersduk fuktad med vatten och handdiskmedel						
Smörjning av bägare och insats-upphängning	Rotorn torkas ren med vatten och handdiskmedel. Torka av gammalt fett från rotorns svängtappar och lägg på lite nytt fett/ vaselin som finns i underhållspåsen.						
<b>Varje år</b>							
Årsservice utförs av MT							