


Praktisk instruktion för droganalysbeställning

Detta är en praktisk instruktion för hur en beställning av droganalys ska ske. Tänk på att förpackningen endast får öppnas i närvaro av klienten. För information och förhållningssätt gällande hantering och provtagning av klienten, se baksidan av beställningsblanketten.

1. Ta fram den kvalitetssäkrade provförpackningen (emballage) och kontrollera innehållet innan provtagningen påbörjas. Provförpackningen ska innehålla en provtagningsburk, en klisteretikett (med flera streckkoder), en transporthylsa, ett provtagningsrör, en beställningsblankett och en transportpåse. Skulle något saknas – kassera hela den öppnade förpackningen (inklusive allt innehåll) och ta en ny.

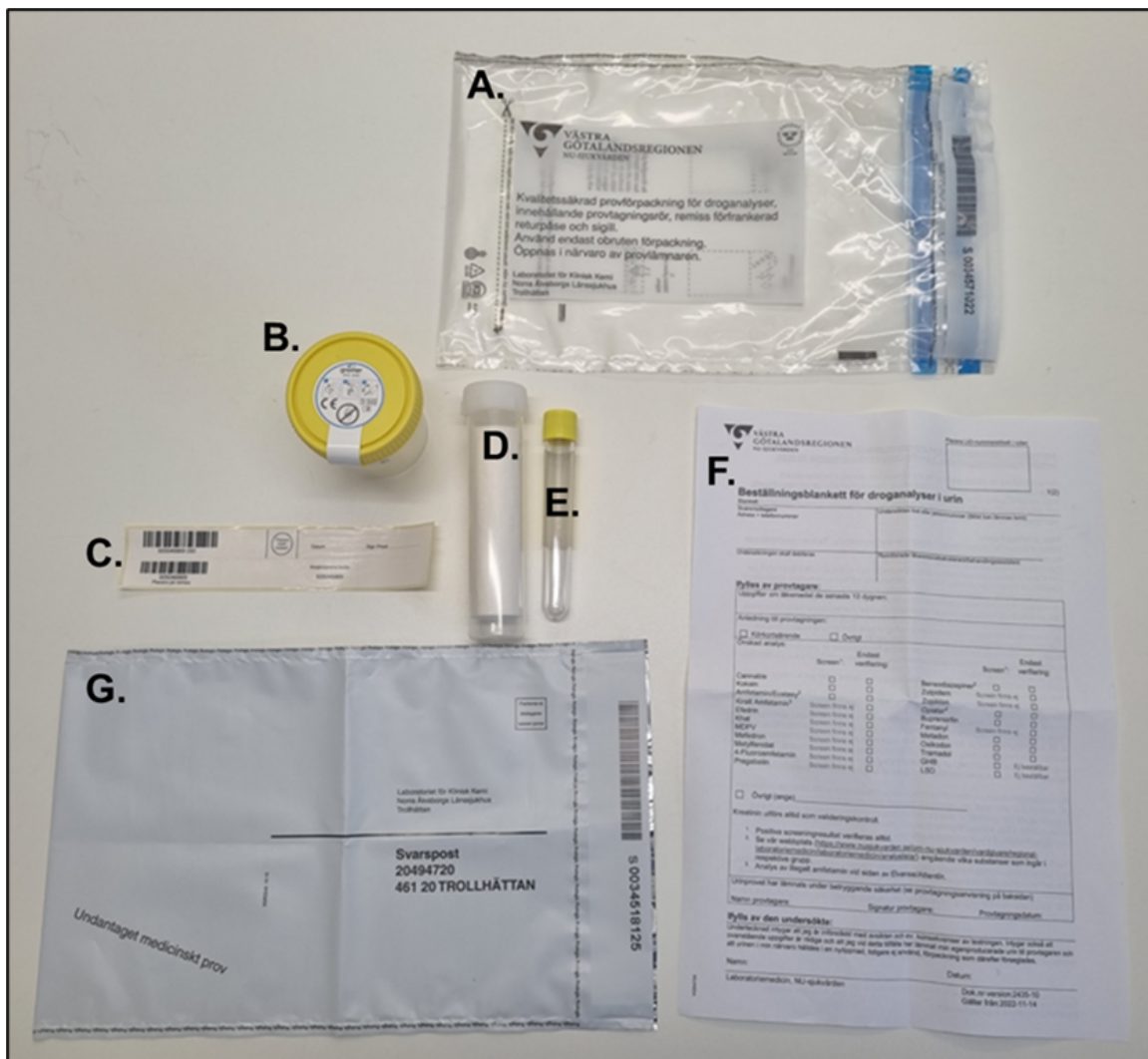

A: Provförpackning (emballage)

E: Provtagningsrör

B: Provtagningsburk

F: Beställningsblankett

C: Klisteretikett med streckkoder

G: Transportpåse


D: Transporthylsa

Praktisk instruktion för droganalysbeställning

- Utför identitetskontroll på klienten. Ta av klisterlappen på den medföljande provtagningsburken. Öppna och fyll provtagningsburken med klientens urin, cirka 20-30 mL




- Fyll i provtagarens initialer och provtagningsdatum på anvisad plats (rödmarkerad ruta) på etiketten som ska fästas på provtagningsröret.

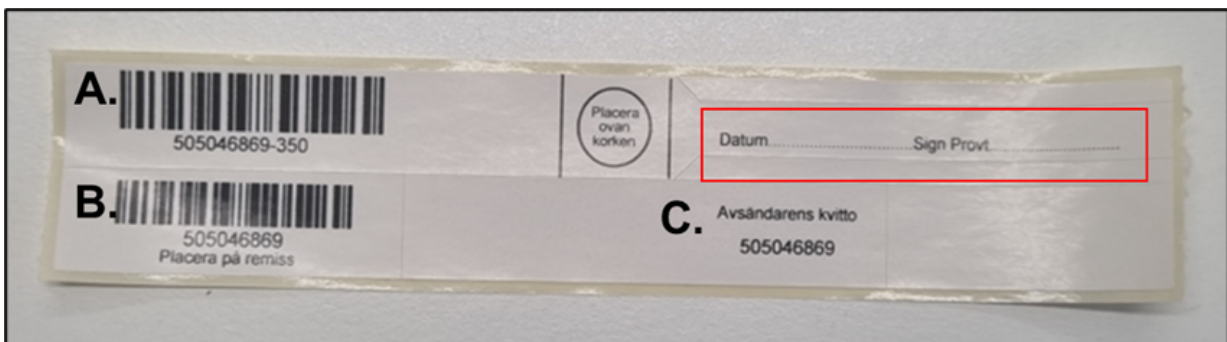

- A: Etikett att fästa på provtagningsröret
- B: Etikett att fästa på beställningsblanketten
- C: Kvitto på beställningen (spara denna, används vid telefonkommunikation)

Praktisk instruktion för droganalysbeställning

- Tryck fast provtagningsröret (med korken på) och låt vakuomet i provtagningsröret fylla det med urin. Kassera därefter provtagningsburken.

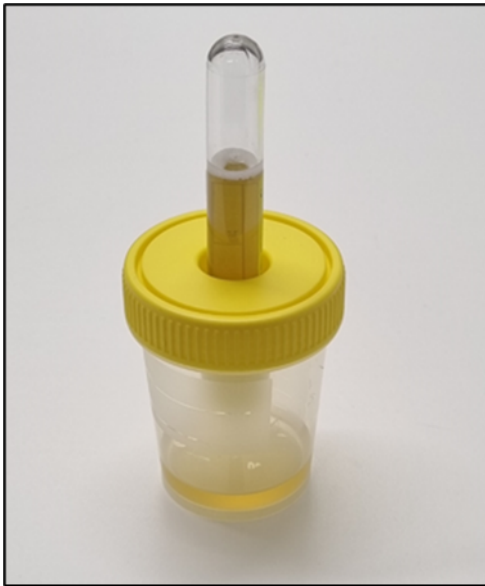

- Placera rötetiketterna enligt nedanstående bilder.



- Tag provtagningsröret och för ner det i transporthylsan.



Praktisk instruktion för droganalysbeställning

F: Beskriv ev. intag av preparat de senaste 10 dyggen

G: Orsak till provtagning

H: Analysval

I: Provtagarens hela namn, signatur och provtagningsdatum.

J: Underskrift av klienten samt provtagningsdatum

Vid punkt H, fyll endast i ett kryss per analys (positiva screen-resultat verifieras alltid).

8. Ifylld beställningsblankett och transporthylsa innehållande provtagningsrör med urin placeras i transportpåsen.
9. Drag bort "aluminiumplastfolien" och förslut transportpåsen med hjälp av klisterremsan.
10. Provet är nu klart för att transporteras till laboratoriet. För ytterligare information om provtagningsutförande och förhållningssätt se baksidan av beställningsblanketten.