

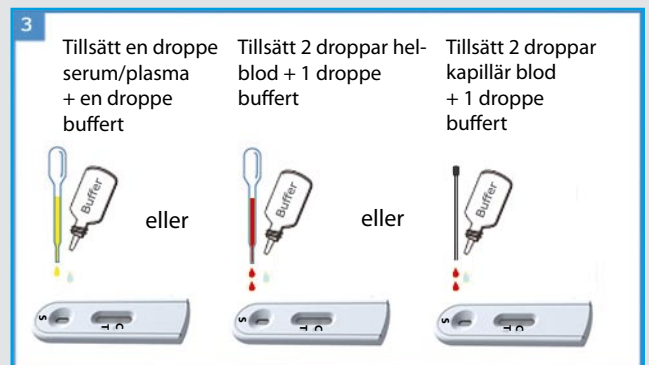
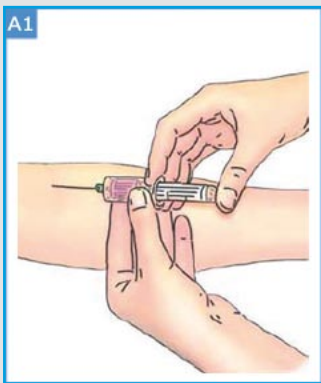


Snabbguide för Diaquick Mononukleose kassett

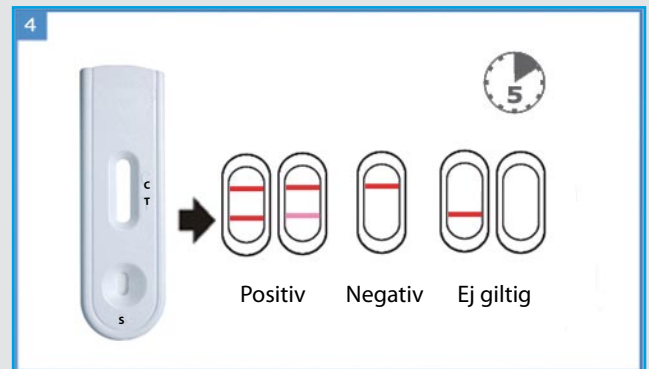

Starta tidtagningen !

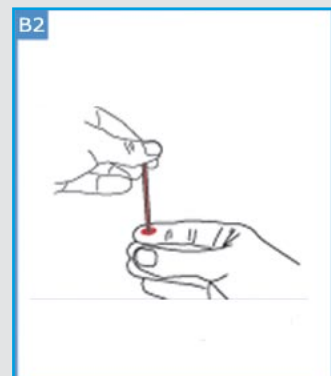

A. Ta ett venprov och blanda gott.

B. eller ett kapillärprov

Avläs efter 5 minuter och alltid inom 10 minuter.

LAGRING:

- Diaquick Mononukleos kassetterna förvaras i rumstemperatur eller i kyl.
- Öppnad reagens är hållbar till angiven utgångsdatum på förpackningen.
- Vid kylförvaring måste kassetterna ha rumstemperatur innan analysering
- Kassetterna ska förvaras i förpackningsfolien innan de används.

Observera att detta är en snabbguide och det rekommenderas att läsa bipacksedeln