



nal von minden NADAL® hCG Graviditetstest: testprocedur och utvärdering

1



15 sec

- Läs hur hela förfarandet går till innan testet genomförs. Låt teststickor och urinprov uppnå rumstemperatur (15-30°C).
- Avlägsna teststickan ur förpackningen och håll i änden där "hCG" är tryckt.
- Doppa stickan i 15 sekunder i urinprov. Provvätskan bör inte nå högre än till det markerade max nedsättningsdjupet. Placera teststickan på en ren och plan yta som inte suger åt sig vätska (t.ex. på förpackningen).

2



3 min

- Vänta på att en färgad linje framträder. Ett positivt resultat med högkoncentration av hCG kan avläsas efter 40 sekunder. Tolkningstiden för urinprov är mellan 2-5 minuter.


Gravid



Inte gravid



Ogiltigt

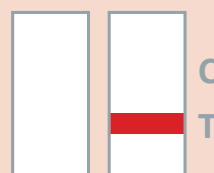

nal von minden GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 12
47445 Moers
Tyskland

Friedenstrasse 32
93053 Regensburg
Tyskland

Gratis Tel.: 020 790906
Gratis Fax: 020 918262

info@nal-vonminden.se
www.nal-vonminden.se

Företagsledare:
Sandra von Minden
Roland Meißner
Thomas Zander

Handelsregistret Kleve
HRB 5679
Skattenummer:
244/133/00130

Konto: PG 57894-8 Nordea
BIC: NDE AESS
IBAN: SE8995000099604200578948

Patientnära snabbtest

Laboratoriediagnostik

Laboratorieservice

Konsultation & Service