


Snabbguide HemoCue Hb 201 DM

Anvisning Patientnära analysverksamhet

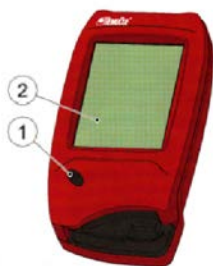


Uppstart av Instrument

- Sätt på instrumentet
- Tryck på knappen På/Av (1)
- Följ instruktionen på skärmen (2)
- Vid uppstart gör instrumentet en självtest som tar ca 20 sekunder




Ange Användar-ID

- Scanna in användar-ID = VGR-ID (streckkod)
- Tryck och håll ner scannersymbolen (1)
- Instrumentet hålls 20-30 cm från streckkodsetiketten (2 och 3)

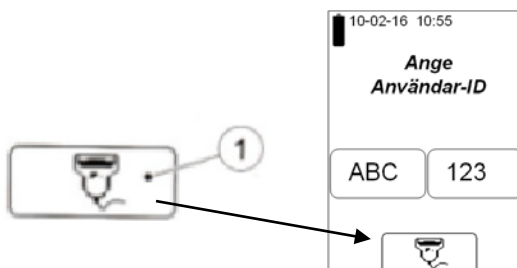


Provtagning

- Patientens hand ska vara varm och avslappnad
- Rengör fingret med desinfektionsmedel
- Gör ett bra stick, torka av de 3 första dropparna

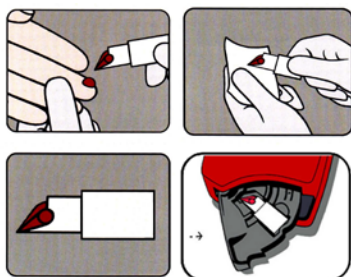

Utförande




- Tryck fram en stor droppe och fyll kuvetten i ett enda moment. Obs! Efterfyll inte!
- Torka av blodrester på kuvettens utsida
- Lägg kuvetten i hållaren, för in kuvetthållaren i mätläge. Kuvetten ska analyseras inom 10 minuter

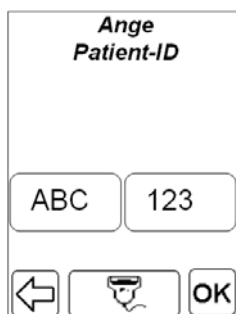

Ange Patient-ID för Rutin-prov

- Tryck på scannersymbolen och scanna in patient-ID
- Kontrollera patient-ID, tryck OK

Hb resultat visas inom 60 sekunder

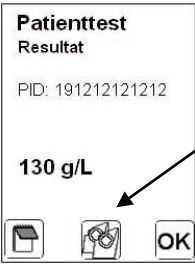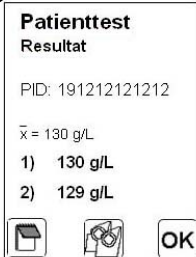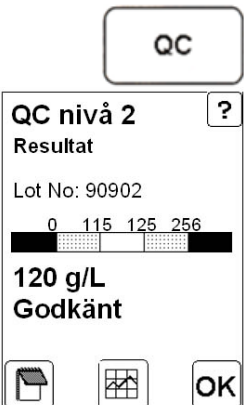 	Patienttest Resultat för B-Hb Mätområde: 0 – 256 g/L Referensintervall: Kvinnor: 117 – 153 g/L Män: 134 – 170 g/L - Tryck på symbolen Dubbelprov, utför ytterligare ett test med ny droppe blod och ny kuvett - Följ anvisningarna på skärmen - Tag medelvärdet ($\bar{x}$) som patientresultat Varning kommer om dubbelprov skiljer mer än 10g/L Underkänt – gör om provtagningen
	- Tryck på anteckningsboken för att lägga till kommentar - Tryck på OK för att lagra provresultaten
	Logga ut
	AKUT-prov - Tryck på ambulans symbolen - Inget krav på Patient-ID. Tryck OK 2ggr - Fyll, torka och lägg i kuvetten - För in kuvetthållaren i mätläge
	Utföra kontroll / QC-test Internkontroll - Tryck på symbolen QC - Välj nivå på kontrollen (Låg = Nivå 1, Normal = Nivå 2, Hög = Nivå 3) - Lägg en droppe kontrollblod på ett plastat underlag - Fyll kuvetten, torka och lägg den i hållaren - Scanna in kontrollens lot-nummer - Resultatet visas. Tryck OK för att lagra resultatet - Godkänd kontroll – OK att analysera patientprov - Underkänd kontroll – Kör om kontrollen, ev felsök
 Lagrad data Granska Radera Senasta överföring Logginmattning ← Granska Alla data Patient/Akuttest QC-test Instrumentlogg ←	Hämta patient- eller Kontrollresultat / Lagrad data - Tryck på symbolen Lagrad data - Fel lösenord.....Tryck OK! - Välj Granska - Välj Patient/Akuttest eller QC-test - Inget krav på Ange datum Från/Till. Tryck OK 2ggr! - Inget krav på Ange Patient-ID. Tryck OK! - Bläddra med pilarna, därefter tryck OK! ← Tillbaka till huvudmenyn
Kvalitetskontroll HemoTrol ska utföras varje dag som instrumentet används. Alternera mellan två nivåer. Om kontrollen fortfarande inte går in kontakta instruktör på Klinisk kemi Fler detaljerade instruktioner finns i metodbeskrivningen.	