

Laboratoriemedicin

RUTIN FÖR URAKUTA PK

Rutinen gäller för strokealarm och akuta operationer/andra akuta situationer på Waranbehandlade patienter.

Rutin för beställare (företrädesvis AKM, IVA, OP eller strokeavd)

- Beställaren tar prov på patient som bedöms som urakut. Beställaren förvarnar Laboratoriemedicin, telefon 98571, att ett urakut PK kommer inom kort.
- Beställaren använder [Blankett för urakut PK](#) som komplement till beställning i Melior eller remiss vid reservrutin. Prov och blankett lämnas till Laboratoriemedicin utan dröjsmål. **Mycket viktigt att notera telefonnummer dit svaret ska ringas.**

Rutin på Laboratoriemedicin

1. Notera ankomsttid på [Blankett för urakut PK](#).
2. Centrifugera provet omgående i tom centrifug på stora lab.
3. Förvarna koagulationsplaceringen om att urakut prov för PK(INR) är på väg, för att förbereda plats i tomt koagulationsinstrument.
4. Lämna [Blankett för urakut PK](#) till koagulationsplaceringen tillsammans med färdigcentrifugerat prov.
5. Analysera provet i för övrigt tomt instrument så inga väntetider uppkommer.
6. Bevaka analyseringen och godkänn provet i LifeCare/FlexLab så snart analysen är klar.
7. Ring svaret på angivet telefonnummer.
8. Skriv tid då svaret ringdes och signera.
9. Sätt blanketten i avsedd pärm på Koagulationsplaceringen.

Titel	Dok. nr.	Giltig fr.o.m.	Sida
Rutin för urakuta PK	1817-9	2022-10-04	1(1)