

# Patientinstruktion F-Hemoglobin Actim immunologisk metod

---

## Provtagning & provhantering


Analysen påverkas inte av diet, järntillskott eller intag av C-vitamin. Blödningar i magtarmkanalen är ofta intermittenta, varför upprepad provtagning bör utföras.

Fecesprov kan tas antingen på ett toalettpapper eller i ett rent, torrt engångskärl. Fecesprov taget i engångskärl bör förvaras i kylskåp. Hållbarheten är 3 dygn om provet förvaras i kylskåp (2 - 8°C) och 3 - 4 timmar om förvaring sker i rumstemperatur.

Provtagningsrör med fecesprov kan förvaras maximalt 7 dagar i rumstemperatur eller i kylskåp (2 - 25°C) innan analysen utförs. Om möjligt är det att föredra att provet förvaras i kylskåp.

## Provtagning i provtagningsrör till Actim Fecal Blood

Märk provtagningsröret med patientidentitet.

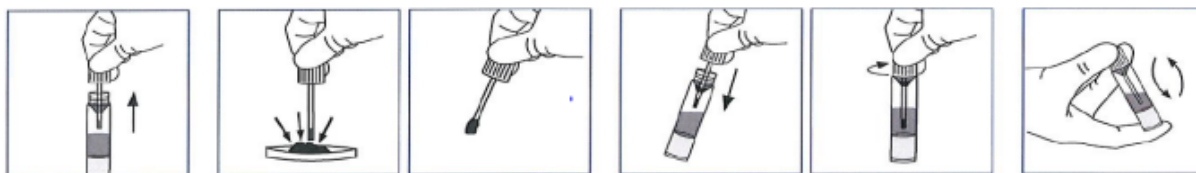

1. Skruva av skruvlocket. Ta prov med pinnen som sitter i skruvlocket. Roter pinnen på olika ställen i fecesprovet så att fårorna i pinnens nedre del fylls. Om provet är flytande, torka av provtagningspinnen med toalettpapper innan den sticks i fecesprovet. Fårorna kan då fyllas med flytande prov

2. Torka av överskottet av feces med papper/celltork. Det är viktigt att inte ta mer prov än det som ryms i fårorna på pinnen!

3. Skruva på locket och skaka röret.

Om patienten själv utför provtagningen är det viktigt att i samband med att provtagningsmaterial lämnas ut, informera och demonstrera angående provtagningen.