

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar

Nr 13, 2024-06-11

Förändring gällande beställning av kontroller till patientnära analysinstrument (PNA) samt information om nytt kontrollintervall

Förändringen gäller följande instrumenttyper:

- HemoCue (glukos och Hb)
- QuikRead Go (CRP)
- StatStrip (blodketoner)
- Clinitek (urinsticka)

Klinisk kemi och transfusionsmedicin kommer inte längre tillhandahålla internkontroller till PNA-instrument. Varje verksamhet på Kungälvssjukhus ansvarar därmed för att köpa in sina egna kontroller från Marknadsplatsen.

Förändringen gäller från och med 2024-09-02.

Samtidigt ändras kontrollintervallet för Hemocue-Glukos och HemoCue-Hb. Istället för att som idag analysera en kontrollnivå 1 gång/dag, ska glukos- och Hb- kontroll analyseras 1 gång/vecka. Samtidigt införs ny rutin som innebär att två kontrollnivåer analyseras vid samma tillfälle. Se beställningsinformation på nästa sida för info om vilka kontrollnivåer som är aktuella för respektive instrument/analys.

Från och med 2024-09-02 kommer det inte längre vara möjligt att analysera patientprover på PNA-instrumenten om internkontrollerna inte är analyserade i tid, eller inte ligger inom godkända gränser. Instrumenten är låsta för patientprov tills dess att kontroller analyserats med godkänt resultat.

Förändringen genomförs som ett led i ensning av rutiner på samtliga PNA-instrument i slutenvården i VGR.

Sammanfattning

- Från och med 2024-09-02 kommer Klinisk Kemi och transfusionsmedicin inte längre lämna ut internkontroller
- Varje verksamhet beställer internkontroller till sina PNA-instrument
- Förändrat kontrollintervall på Hemocue-Glukos och Hemocue-Hb
- Instrumenten låses för patientprov om kontroll inte analyserats i tid eller om kontrollresultatet inte varit godkänt

Instrument/Analys	Benämning i Marknadsplatsen	Artikelnummer
HemoCue-glukos	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning glukos medel (ca 6,7 mmol/L), HemoCue 	103786059
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning glukos hög (ca 11,1 mmol/L), HemoCue 	103786109
HemoCue-Hb	<ul style="list-style-type: none"> HemoCue Kontrollösning Hb, låg nivå, ca 80g/L 	103786000
	<ul style="list-style-type: none"> HemoCue Kontrollösning Hb, medel nivå, ca 120g/L 	103786075
Quikread Go, CRP	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning CRP, QuikRead Go 	200005367
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning CRP hög, QuikRead Go 	108387291
StatStrip, blodketoner	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning Glukos/Keton Normal 	110159787
	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollösning Glukos/Keton Hög 	110159795
Clinitek, urinsticka	<ul style="list-style-type: none"> Chek-Stix UA DipTube Liquid QC 1 förpackning innehåller 3 negativa och 3 positiva kontroller 	200012903

Vid eventuella frågor kontakta:

Ulrika Torberntsson

PNA-ansvarig Kungälv's sjukhus

072-224 37 78/ 0303-98571

ulrika.torberntsson@vgregion.se