

Gäller för: Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Giltig från: 2025-01-15

Innehållsansvar: Annelie Raidla Lund, (annra23), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-01-15

Granskad av: Magnus Belfrage, (magbe5), Undersköterska

Godkänd av: Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

# Syrgasbehållare hantering - AKUTEN

## Förändringar sedan föregående version

Inga

## Syfte

Att säkerställa hantering och tillgång till syrgas.

## Arbetsbeskrivning

Syrgasbehållarna och syrgasbehållare med sugaggregat hänger i stora förrådet.

Bruksanvisning hänger på väggen.

Syrgasbehållare för transporter av patient med CPAP skall hänga på Akutrum 1.

Gasansvarig, tel. 35430, kontrollerar behållarna varje vardagsmorgon kl. 08:00 och byter ut de med lite innehåll. Kontinuerliga byten sker under hela dygnet. Kvällstid och helger är det akutvaktmästarna som har ansvaret, tel. 34026.

Syrgasbehållare används vid transport till röntgen, avdelningar och till patienter som ligger i korridoren.

## När du kopplar syrgasen till patienten:

- Öppna den gråa huvudkranen till ”On”, därefter ställer du in syrgasvredet på så många liter du vill ha. Hör efter att det pyser från behållaren. Kontrollera mängden syrgas på den digitala displayen. Vid röd markering häng den under ”Tomma bomber”.
- Försäkra dig om att syrgasen räcker under transporten.
- Ställ in den mängd syrgas patienten skall ha. Läs av hur lång tid syrgasen räcker. Vid transport skriv på transportsedeln hur länge syrgasen beräknas räcka samt om syrgasen får kopplas ifrån.
- Om du kopplar syrgasbehållare till patient i korridoren skriv på kommentarsraden i Elvis hur länge syrgasen räcker.

- Låt syrgasbehållaren hänga väl synlig på bårvagnen. Lägg den inte under britsen. Vid ev. brand ska den vara synlig för att kunna föras i säkerhet.
- När patienten inte behöver syrgas längre – Kontrollera på displayen hur mycket syrgas som finns kvar, stäng av huvudkranen och för syrgasvredet till 0. Häng tillbaka i förrådet.
- Ta med syrgasbehållaren ned till AKM när du lämnat patient på IVA.
- Häng tillbaka behållaren på avsedd plats i förrådet.

Vid skada på behållaren sätt lapp med datum på behållaren så tar gasansvarig hand om den.

## Ansvar

Linjechefen ansvarar för att rutinen finns och följs.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning  
Östra

**Innehållsansvar:** Annelie Raidla Lund, (annra23),  
Sjuksköterska

**Granskad av:** Magnus Belfrage, (magbe5), Undersköterska

**Godkänd av:** Sofia Ekdahl, (sofek1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9772-1276147733-126

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2025-01-15

**Giltig till:** 2027-01-15