

Gäller för: Verksamhet Ambulans prehospital akutsjukvård  
Innehållsansvar: Mikael Frondén, (mikfr3), Vårdenhetschef  
Granskad av: Elisabeth Tejlin, (elite1), Vårdenhetschef  
Godkänd av: Elisabet Hammar, (eliha30), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14

## Daglig kontroll / Veckokontroll av Corpuls3 Ambulanssjukvården SU

### Steg 1: Starta apparaten.

- Se till att apparat är ihop monterad som en kompakt enhet.
- Starta apparat. Internt självtest genomförs, kurvor och parametrar visas.
- Kontrollera att symbolen för kommunikation mellan moduler visas med ett fyllt streck (mekaniskt anslutna).
- Kontrollera laddningsstatus på apparaten.

### Steg 2: Test av kommunikation mellan moduler och visuell inspektion.

- Montera isär de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation mellan moduler ändras till en vågform.
- Koppla ihop de tre modulerna. Kontrollera att symbol för kommunikation återigen blir ett fyllt streck.
- Kontrollera att apparat, patientkablar, två stycken corPatch-easy defibrilleringselektroder (vuxen), EKG elektroder och rakhyvel är på plats och ej har några visuella skador/felaktigheter.

### Steg 3: Skrivare och strömförsörjning.

- Kontrollera att det finns tillräckligt med papper i skrivaren. Skriv förslagsvis ut en skärmdump. Den röda markeringen som indikerar att pappret snart är slut ska inte visas. Extra rulle skrivarpapper ska finnas i bilen.
- Anslut åter apparaten till strömförsörjning i bilen och kontrollera att lampan för strömförsörjning lyser.

### Steg 4: Defibrillator.

- Anslut testboxen till defibrillatören med förlängningssladden ansluten. Se till att testboxen är påslagen och lyser grönt.
- Genomför en (intern) **manuell** defibrillering med 200J. Kontrollera att energin laddas ur via testuttaget och att inga felmeddelanden ges. Fungerar ej att göra i AED läge.

## **Veckokontroll enligt ovan med tillägg av**

### **Steg 4: Defibrillator och EKG.**

- Daglig kontroll
- Koppla 4-avl EKG kabel och 6-avl EKG till respektive färgmarkerade platser på testboxen.
- Gör ett EKG-signaltest genom att välja D-EKG och kontrollera att samtliga avledningar visas på skärmen.
- Kontrollera utgångsdatum på EKG elektroder och defibrilleringselektroder.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Ambulans prehospital akutsjukvård

**Innehållsansvar:** Mikael Frondén, (mikfr3), Vårdenhetschef

**Granskad av:** Elisabeth Tejlin, (elite1), Vårdenhetschef

**Godkänd av:** Elisabet Hammar, (eliha30), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9772-1276147733-27

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-10-14

**Giltig till:** 2026-10-14