

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Giltig från: 2026-03-05

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-05

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

DIAGN - C-båge GE, OEC One CFD – omvårdnadsrutin

Förändringar sedan föregående version

Ändringar gjorda Utrustning underrubrik korrigerad, samt under Användning är punkt 5 korrigerad.

Bakgrund och syfte

Beskrivning för att C-bågen används på ett säkert sätt.

Förutsättningar

Sjuksköterskor på Lungdiagnostisk mottagning, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Utrustning

Vid följande undersökningar kan C-båge användas

- Bronkoskopi
- Insufflation/exsufflation
- Torakoskopi
- Transtorakal biopsi
- Pleuradränage

Handhavande av C-Bågen

- Teoretisk samt praktisk strålskyddsutbildning för C-båge användare sker vart 3:e år av MFT/Diagnostik strålningsfysik.
- Lista över personal som genomgått utbildningarna finns i pärm C-båge på sjuksköterskeexpeditionen.
- Kort bruksanvisning, finns vid C-bågen samt i pärmen C-båge på sjuksköterskeexpeditionen.
- Årlig kontroll av strålskyddsförkläden. Protokoll finns i pärm C-båge.

Vid användning

- Graviditetskontroll på kvinnor 15 – 45 år
- Skylt ska hängas upp på dörren till undersökningsrummet
- Personalen ska använda strålskyddsförkläden
- Rengöring utförs med 75 % sprit + tensid
- Genomlysningstid och KAP-värde läggs in i Orbit.

Kategoriindelning av arbetstagare som arbetar med joniserade strålning vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- Tjänstgörande personalen på lungdiagnostiken tillhör kategori B
- Dokument över detta finns på intranätet.

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har sektionschefen eller av denne utsedd person.

Relaterad information

Pärm C-båge på sjuksköterskeexpeditionen.

Arbetsgrupp

Rutinen är framtagen av: Jeanette Sundberg, sjuksköterska och Eva Erriahi, undersköterska, Lungdiagnostisk mottagning

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Aktuell version är reviderad av: Mia Johansson, sjuksköterska,
Lungdiagnostisk mottagning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin, Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

Innehållsansvar: Mia Johansson, (miajo2), Sektionsledare

Granskad av: Marie Roth, (marro50), Vårdenhetschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9788-135611145-38

Version: 10.0

Giltig från: 2026-03-05

Giltig till: 2028-03-05