



## DT monitorering Canon

1. Välj premonitoreringsnittet i **Scan Mode S&V**.
  2. **Scan Mode SureStart** är monitoreringen som följer premonitoreringsnittet.
  3. För ett nytt premonitoreringsnitt, tryck på Nr 1 så denna rad blir markerad. Klicka på **Previous** två gånger. Flytta snittet och klicka på **Confirm**
  4. Starta monitorering och sprutan samtidigt. Undersökningen startar automatiskt då önskad HU uppnåts. För manuell start av undersökningen klicka på **Next Scan**.
- För att flytta Roi'ns position under själva triggingen använd pilarna på Scan Displayen (Se bild).

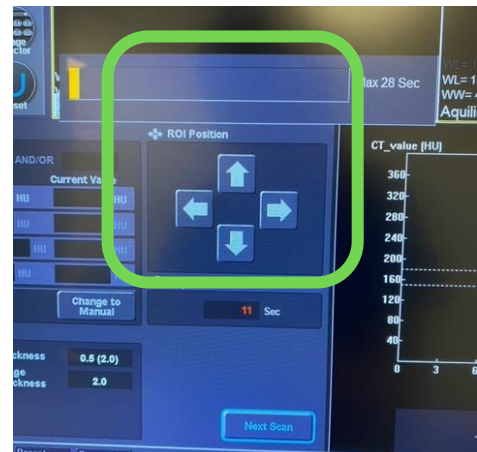

- Är premonitoreringsnittet för brusigt kan tjockleken ändras på snittet. Klicka på **Scan Details** och sedan på **Thickness**. Välj 1.0 x 4. (se bild)

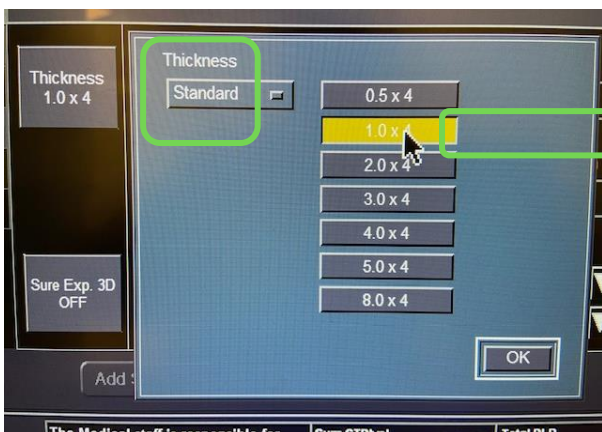

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Eva Eng Forsberg, (evafo6),  
Specialröntgensjuksköterska

**Granskad av:** Eva Eng Forsberg, (evafo6),  
Specialröntgensjuksköterska, Marit Johannesson, (marjo154),  
Specialröntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Caroline Sandahl Molinder, (carwe12),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-2297

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-12-19

**Giltig till:** 2027-12-18