

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-21

Giltig till: 2027-05-19

# Faxitron daglig kalibrering

## Syfte

Att kunna starta upp Faxitron, göra daglig kalibrering och stänga av Faxitron.

## Metodmall

**OBS!** Se till att Faxitron(CoreVision) är tom vid uppstart. Kalibrering utförs daglig.

- Sätt på datorn och Faxitron (svängnyckeln).
- Vänta 15-20 minuter, apparaten värmas upp.
- Starta Biopticvision (dubbelklicka).
- Apparaten kalibrerar själv, ta 4-5 minuter.

Faxitron stängs av efter dagensjobb.

- Shutdown system först.
- Svängnyckeln efter datorn stängts.

## Strålskydd

<https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/vard/medicinsk-diagnostik/stralsakerhet/>

## Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

Övrigt

Referenser

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Radiologi

**Innehållsansvar:** Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9802-1816834204-958

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-05-21

**Giltig till:** 2027-05-19