

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2025-02-13

Innehållsansvar: Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-02-13

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Daglig rutin På Röntgen-lab Mammografi

Syfte

Att tydliggöra arbetsbeskrivning för Daglig rutin på Lab1,2,3,4.

Uppstarta Modaliteten

1. Starta röntgenapparaten.
2. Vänta ca 10 minuter eller tills det röda krysset längst på modalitetsskärmen har försvunnit.
3. Kör morgonkontrollen: Daglig-kontroll På Modaliteten.
4. Varje måndag på lab1 och lab2 efter morgonkontroll körs kalibrering: Stereo vecktest.
5. Sätt på ansiktsskydd samt kompressionsplattan.
6. Vinkla rör-armen 90 grader åt båda håll.
7. Se till att RIS och PACS är påslagna.

OBS! Lab1 och lab2 samt lab4 skall kalibrera biopsienheten.

Intervaller är 3 månader. Morgonkontroll körs efter: Stor kalibrering av biopsienheten Rosa Famton.

Avstäng Modaliteten

1. Shutdown systemet.
2. Stäng av kontrollpanel efter skärmen är släckt.
3. Avstängningen av röntgenapparaten skall utföras varje dag.

Strålskydd

<https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/vard/medicinsk-diagnostik/stralsakerhet/mr-sakerhet/>

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

Övrigt

Referenser

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Jiaye Cui, (jiacu1), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-992

Version: 4.0

Giltig från: 2025-02-13

Giltig till: 2027-02-13