

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-13

Giltig till: 2027-01-27

Teknik - Engångsbronkoskop Ambu aView

Revidering i denna version

Januari 2025: Uppdatering av bilder och uppkoppling till TV på NIVA.

Syfte

Beskriva iordningställande och användning av engångsbronkoskop.

Arbetsbeskrivning

1. Sätt på monitorn, tryck på ON/OFF knappen vid höger sida på monitorn redan när det hämtas. Batteritid vid full laddning är tre timmar.
2. Koppla in sladden på bronkoskopet i den blå adaptorn vid sidan av skärmen. Smörj bronkoskopslangen med glidgel, Dimetikon (finns i NIVAs, CIVAs och PIVAs läkemedelsrum) undvik toppen. Om toppen blir smutsig, gnugga försiktigt med en kompress.
3. Koppla upp en extra sug till bronkoskopet på salen. Koppla till sugslang på vänster sida av handtaget och tryck på den vita knappen för att kontrollera att sugen fungerar.
4. Efter användning slängs bronkoskopet i gula riskavfallslådan i skölj eller orent diskrum. Om ny bronkoskopi ska utföras vid ett senare tillfälle på patienten får ej samma bronkoskop användas igen enligt hygienföreskrifter.
5. Släng allt i korgen och ersätt med nytt enligt bilden. Skärmen torkas av med ytdesinfektionssprit 70%. Om blod har kommit på skärmen kan Incidin användas. Sätt tillbaka vagnen iordninggjord i blodgasrummet på NIVA/renförråden CIVA/labrummet på PIVA. Skärmen skall alltid stå på laddning. Häng alltid upp ett nytt bronkoskop i storlek Regular 5.0/2.2. Nya hänger i steriltörrådet på CIVA/NIVA/ ligger i labrummet på PIVA. Det finns tre olika storlekar på engångsbronkoskopen. PIVA har två olika storlekar.



Detta ska alltid ligga i korgen:

- Kopplingsstycke (engångs)
- Sterilt vatten 4 st
- Celltork och B6-skål.
- Antifogg 0,5 ml (NIVA/PIVA)
- Dimetikon (glidgel) i 1 ml spruta
- Bitblock på (CIVA/PIVA)

Här ska kabeln till engångsbronkoskopet sitta




På/av knapp på sidan

Uppkoppling till TV

På NIVA finns möjlighet att koppla engångsbronkoskopet till TV:n på sal. Sätt HDMI kabeln i uttag på baksidan av TV i HDMI1. Välj HDMI på TV:n.




Sätt HDMI kabeln här

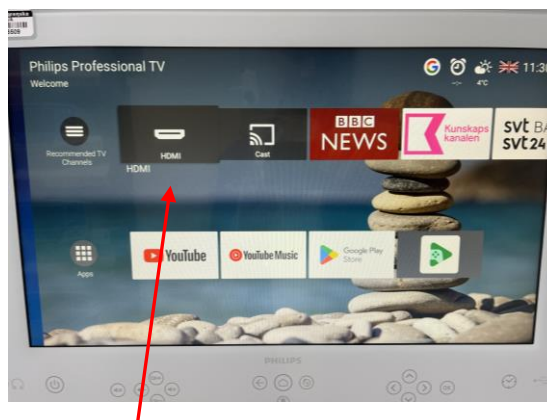

Välj HDMI på tv:n.

Odling via bronkoskopet

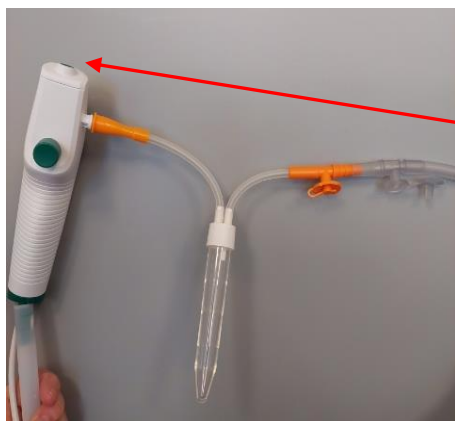

Koppla odlingsröret mellan bronkoskopet och sugslangen på detta vis.

Här kan NaCl sprutas ner

Tryck in den gröna knappen för att suga i bronkoskopet

Relaterad information

Se under tekniksida apparatinstruktioner på CIVA/NIVA/PIVA avd 22 och Postop avd 95 SharePoint.

[Ambu, Instructions-bronkoskop](#)

Granskare/arbetsgrupp

Jenny Andersson, Teknikansvarig sjuksköterska CIVA, SU/Sahlgrenska

Frida Mattson, Teknikansvarig sjuksköterska CIVA, SU/Sahlgrenska

Eva Jägheden, Teknikansvarig sjuksköterska NIVA, SU/Sahlgrenska

Pernilla Gustafsson, Teknikansvarig sjuksköterska NIVA, SU/Sahlgrenska

Elisabeth Skarlöv Teknikansvarig sjuksköterska PIVA avd 22 och Postop 95.

SU/Sahlgrenska

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1023

Version: 8.0

Giltig från: 2026-01-13

Giltig till: 2027-01-27