

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska
Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22), Anestesisjuksköterska
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13

Handhavande Wassenburg endoskopidesinfektor

Dagligen

Kör båda diskbehållarna utan innehåll med programmet ”C-mac handtag”. Kontrollera M-spritsbehållaren och fyll på vid behov.

Signera på listan i tidskriftssamlaren till vänster om torkskåpet.

Varje måndag:

Termisk självdesinfektion av båda diskbehållarna.

Tryck på menyn:

Verktyg

Självdessinfektion

Termisk desinfektion

Sätt i läcktestplugg och tryck OK

Flytta från A till B och starta



När den termiska desinfektionen är klar, flytta tillbaks plugg (A och B) och se till att den verkligen sitter fast – annars kommer larm ”ingen vattentillförsel” och MTA behöver kontaktas.

Bocka i på filtret när självdesinfektion är gjord och skriv signatur på listan som ligger i tidskriftssamlaren på väggen till vänster om torkskåpet.

Ansvar

Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för spridning och implementering av rutinen inom sitt verksamhetsområde. Det faller inom dennes ansvar att se till att rutinen är känd och följs av berörd personal. Varje enskild medarbetare ansvarar för att följa rutinen i sitt arbete.

Granskare/arbetsgrupp

Nastassia Hilding Werner, Avdelningslärare Anestesi 5, An/Op/IVA,
Omr 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Christine Erixon, undersköterska Anestesi 5, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Anestesi 5 Sahlgrenska, Verksamhet Anestesi-
Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carolina Hargeby, (carpe22),
Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1089

Version: 4.0

Giltig från: 2026-03-13

Giltig till: 2028-03-13