

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad
Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2026-11-08

Kylmaskin Hilotherm för postoperativ käckkirurgi

Revidering i denna rutin:

241104 Syfte tillagt, förtydligande gällande justering av temperatur och byte av vatten.

221027 Datum uppdaterat samt utformning av löpande text.

201125 Datum uppdaterat samt utformning av löpande text.

Syfte

Säkerställa och förtydliga handhavande av kylmaskin Hilotherm i den postoperativa vården av patienter som genomgått käckkirurgi.

Arbetsbeskrivning

Bakgrund


Kyla minskar svullnaden samt tar bort en del av smärtan postoperativt. Hilotherm är en kylmaskin som håller en konstant temperatur. Detta ger en bättre effekt på patientens smärta än kylpåsar.

Handhavande

Hilotherm används tillsammans med engångsmasker. Kirurgen ordinerar mål för temperatur och hur länge. Vi kan justera temperaturen efter patientens upplevelse. Kylmaskinen är inställd på att inte gå under 15 grader.

Engångsmaskerna kommer med patienten från operation. Masken medföljer patienten till avdelningen (avdelningen har egen kylmaskin). Stäng av maskinen inför att patienten skrivs ut till vårdavdelning, vänta

någon minut så rinner det mesta av vattnet tillbaka i kylmaskinen.
Koppla ifrån de blå slangarna från patientens mask och lägg de små slangarna från masken i en handske för att undvika läckage.

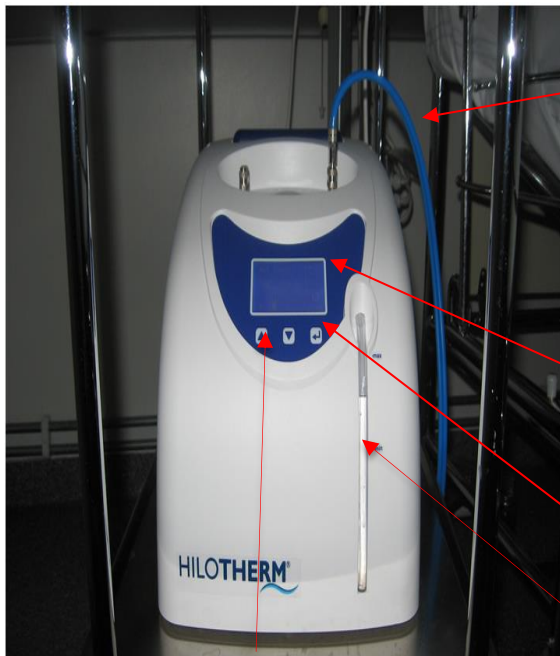

Slangkoppling. Går att koppla bort slangen från apparaten om patienten behöver komma till toaletten. Tryck på stoppknapp, koppla ifrån slangen vid apparaten och behåll de blå slangarna vid masken. Då är vattnet kvar i masken. Låt masken vara kvar på ansiktet.

Display som visar temperaturen i apparaten samt vattentemperatur till patienten

Start/stopp för cirkulation

Indikator för vattennivå. Kan behövas fyllas på efter behov

Pilar för att höja och sänka temperatur i manschetten

Bruksanvisning finns i pärm hos dagundersköterska och på maskinen. Vattnet behöver bytas var 3:e månad. Man kan behöva fylla på med avjoniserat vatten (finns i en dunk under maskinen på vagnen). Fyll på vattnet genom filtret på apparatens ovansida. Se till att nivån är strax under max på indikatorslangen uppe på maskinen. Kylmaskinen ska vara avstängd vid påfyllning. On/Off-knapp finns på baksidan. Maskinen rengörs med tvål och vatten och avtorkas med sprit.

Granskare/Arbetsgrupp

Elisabeth Skarlöv Teknikansvarig Sjuksköterska PIVA 22 och Postop 95,
AnOpIva Omr 5 SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Jonas Grevsten, (jongu5), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1189

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-15

Giltig till: 2026-11-08