

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Giltig från: 2026-02-20

Innehållsansvar: Carina Wåhlin, (carwa8), Undersköterska

Giltig till: 2028-02-18

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktor

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Operationsbord, Op 4

Syfte

Rutinen syftar till att ge kunskap om de olika operationsbordsmodeller som används på Op 4, samt att utgöra underlag för självstudium/träning alternativt utbildning med handledare.

Arbetsbeskrivning

Rutinen inleds med en övergripande kunskapsgenomgång av modellerna, deras användning och begränsningar.

Operationsbord 2 modeller:

Vi har två typer av operationsbord från Getinge och ett från Medirum på op sal 41, vilka sedan modifieras och används enligt nedan.

- **Getinge**
 - Universalbord: stövlar, benplattor.
 - Extra ryggplatta vid behov, om pat över 185cm.
 - Pelvisförlängare vid röntgen .
 - Vid bockning i sidoläge extra ryggplatta och rosa madrass.
- **Medirum**
 - För parkoppling med Da Vinci XI sal 41. Vid bockningsläge, huvudplatta på, annars ingen huvudplatta.

Begränsningar avseende patientvikt

- **Universalbord:**
 - 250kg vid två extra ryggplattor.
 - 380kg vid en extra ryggplatta.

- Medirum
450 kg centrerat
225 kg vid max-slajdning.

Transportvagnar

1. Medirums operationsbord är stationärt på operationssal41.
2. Till varje operationsbord hör en transportvagn.
3. **Vid på- eller avdockning ska transportvagnen alltid vara maximalt höjd och i planläge.** På operationssalen justeras planläget automatiskt vid pådockning av vagnen efter avslutad operation. Om det uppstår svårigheter med denna manöver, kan det räcka att ladda manöverdosan någon minut.
4. Operationsbordet på operationssal 45 är stationärt med skålar eller egna benplattor.
5. Vid behov kan vagnen tippas/höjas i trendelenburgläge/höjd huvudända med hjälp av justerstag som är placerat under bordet, till höger. Öppna/vrid låsringen, påbörja sedan tippningen och släpp den sedan försiktigt, så tippas bordet ett hack. Upprepa vid mera tippning. Håll emot med andra handen. Använd handtaget för att hålla emot, risken är annars att bordet rasar i botten. OBS! Bordet är tungt.
6. Transportvagnen kan låsas via en pedal/broms.
7. För att höja eller sänka vagnen används en trampa.

Stövlar

- Kontrollera att infästningen av stövlarna hamnar på rätt ställe och med rätt klov.
- Tänk ergonomiskt vid hanterande och lyftning av stövlar, de är mycket tunga

Skålar sal 5

- Benskålar går att ställa i två lägen. Kontrollera infästningen av skålar efter rengöring och innan uppläggning av patient.

Se rutin [Positionering i stövelläge](#) samt [Positionering i benskålar](#).

Säkerhet

- Alla infästningar och skruvar måste vara åtdragna.
- Benplattor ska ”klicka” i ljudligt vid fastsättande.
- Kontrollera att patienten är väl polstrad på utsatta ställen.

Rengöring

- Alla operationsbord och vagnar rengörs med Virkon.
 8. De rosa vacuummadrasserna tvättas med tvål och vatten av städet.

Armbord och armstöd/skenor

- För att underlätta vid fastsättning av armborden så ska de tas av i 90° vinkel. Armborden går att justera i höjddled för att undvika glapp mellan madrass och patientens arm. Svart skruv för att låsa läget är placerad under armbordet. Polstra för en jämn övergång.
- Armstöd/skena finns både låga och lite högre. Välj helst de lägre för lättare åtkomst för operatören. Tänk på att polstra vid armbågen och lägg tummen uppåt.
 9. Placera inte armstöden/skenorna för långt ner då de kan “krocka” med benplattor vid höjning.

Madrasser

- Alla operationsbord är försedda med tryckavlastande madrasser, typ Tempur™.

Fasta pelare på operationssal

- För att höja upp pelaren utan operationsbord, använd “on” och “clean” som dubbelkomando på pelare, vid bland annat rengöring av pelare efter avslutad operation. Separat genomgång av sal 41 vid bredvidgång.

Relaterad information

Vårdhandboken, positionering under operation.

Granskare/arbetsgrupp

Carina Wåhlin, Undersköterska, Operation 4, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Mia Olausson, Undersköterska, Operation 4, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Sandra Jennefalk, Instruktor/Operationssjuksköterska, Operation 4, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Kristina Lundin, Operationssjuksköterska, Operation 4, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Carina Wåhlin, (carwa8), Undersköterska

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1192

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-20

Giltig till: 2028-02-18