

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska
Innehållsansvar: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktör
Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-06

Rektoskopivagn

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Arbetsbeskrivning

Rektoskopivagnen är placerad i robotförrådet och tas in på sal vid behov.

Rektoskopivagn ska innehålla:

Övre vagnshylla

- 1 x1 Tång px rektoskopivagn (steril)
- 1 st ljuskabel Storz + adapter (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 1 st fenestrerat proktoskop (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 1 st handtag till engångsrektoskop (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 1 st tvådelat fenestrerat proktoskop (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 2 st fattningstång till tork (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 1 st stanstång (flergångs, diskas på avd, ren rutin)
- 1 st orange ballong (flergångs, diskas på avd, ren rutin)

Nedre vagnshylla

- 3 st proktoskop, engångs
- 3 st rectoskop, engångs
- 1 st sugset rektoskopisug, engångs
- 3 st spongostan
- 3 fp orange tork

Obs! Vagnen fylls på och rengörs efter användning. Inget smutsigt gods får placeras på vagnen.

Flergångsmaterial att fylla på med finns i kompaktförråd på post-op.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa en standardiserad och hygienisk hantering av rektoskopivagnen.

Arbetsgrupp

Sandra Jennefalk, Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIva,
Område 5, SU

Kristina Lundin, Operationssjuksköterska, Operation 4, AnOpIva,
Område 5, SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation 4 Sahlgrenska

Innehållsansvar: Karin Granqvist, (kargr12), Instruktör

Granskad av: Sandra Jennefalk, (sanca), Instruktör

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1417

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-06

Giltig till: 2028-02-06