

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Giltig från: 2026-04-07

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Giltig till: 2028-04-07

Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Teknik – Sugejektor; Goliat och AGA

## Revideringar i denna version

260323 Förlängt gitlighetsdatum


## Syfte

Att säkerställa korrekt anslutning och kontroll av Goliat och AGA sugejektor.

## Arbetsbeskrivning

Sugejektor Goliat används parallellt med den ”gamla” AGA-typen. Den viktigaste skillnaden är på manometerskalan för undertryck.

- Goliat-ejektorn mäter i bar.
- nAGA-ejektorn mäter i kPa.
- 0,1 bar *motsvarar* 10 kPa.

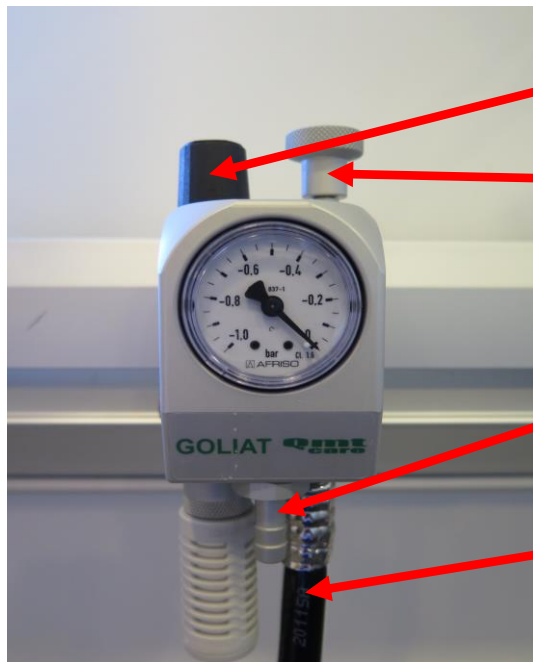

Reglage för undertryck

Lyftknapp för Av och På

Nippel för slang till sugflaskan

Luftslang som kopplas i vägg

- Anslut luftslangen till vägguttag för andningsluft.
- Sätt dit en ny sugbehållare (grönt lock) i sugflaskan och anslut den breda, korta slangen från sugejektorns nippel till sugflaskans vita nippel.
- Anslut den långa sugslangen till sugbehållaren.
- Starta sugen och öppna reglaget för undertryck på full styrka.
- Täpp till sugslangen för att skapa ett undertryck.
- Läs av undertrycket på manometern, det ska nå ett undertryck på – 0,85 bar/-85kPa för att bli godkänt
- Sänk sedan undertrycket med reglaget till mellan -0,2 och -0,4 bar/-20 till -40kPa med öppen mynning på sugslangen.

### Rengöring

- Sugejektorn rengörs med rengöringsmedel och vatten samt ytdesinfektion.

## Granskare/arbetsgrupp

Frida Mattsson Teknikansvarig Sjuksköterska CIVA, An/Op/IVA,  
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jenny Andersson Teknikansvarig Sjuksköterskas CIVA, An/Op/IVA,  
Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska, Central  
intensivvårdsavdelning, Avdelning 95B postoperativ vård,  
Avdelning 95A postoperativ vård, Avdelning 22 postoperativ  
intensivvård

**Innehållsansvar:** Per Persson, (perpe8), Överläkare

**Granskad av:** Per Persson, (perpe8), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1524

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-04-07

**Giltig till:** 2028-04-07