

Gäller för: Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska
Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare
Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare
Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-07

Giltig till: 2028-04-07

Teknik - Utsug vid inhalation av läkemedel

Revideringar i denna version

260323 Förlängd giltighetstid

Syfte

Att kunna koppla ihop aktivt utsug till Servo-U vid administration av särskilda läkemedel i inhalationsform.

Arbetsbeskrivning

Komplement till rutin [Läkemedel - Epoprostenol Flolan kontinuerlig inhalation](#)

Flolan är ett licenspreparat. Även om risken för påverkan på personal bedöms som minimal har CIVA och PIVA valt att för säkerhets skull alltid ha aktivt utsug vid administration av Flolan i inhalationsform.

Slangarna för utsug ligger i apparatförrådet. Se bildspel nedan för ihopkoppling. Utsug finns inte på sal 9, 10, 11 och 12.

Vi användning av Flolan för inhalation används ett ventilationsfilter från Maquet som ligger bredvid utsugsslangarna i apparatförrådet. Filtret byts två gånger per dygn. Märk alltid filtret med datum och tid som det senast byttes.

Det kan förekomma andra inhalationsläkemedel som också behöver utsug, då används samma utsug och filter som till Flolan



Maquetduo- filter på expirationsutloppet



Utsug kopplat på baksidan av respiratorn



OBS! Dra ut den gula knappen till höger för att sätta på utsuget.

Granskare/arbetsgrupp

Frida Mattsson Teknikansvarig intensivvårdssjuksköterska CIVA avd 96,
An/op/IVA

Jenny Andersson Teknikansvarig intensivvårdssjuksköterska CIVA avd
96, An/op/IVA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning, Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Granskad av: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1648

Version: 10.0

Giltig från: 2026-04-07

Giltig till: 2028-04-07