

Gäller för: Flera enheter - se eftersättsblad

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-13

Giltig till: 2027-01-26

Teknik - Videolaryngoskop-användning och rengöring

Revideringar i denna version

2024-12-19 På NIVA torrblåser vi kontakten med tryckluft i rena sköljen.

2024-05-25 Extra laryngoskopsblad finns nu på CIVA.

Syfte

Att säkerställa korrekt montering, handhavande och rengöring av C-MAC videolaryngoskop med tillhörande videoanslutningskabel och monitor.

Arbetsbeskrivning

På CIVA finns det två kompletta set med videolaryngoskop (C-MAC) i 3 storlekar + videomonitor placerade i renrum på respektive sida. Det finns även ett extra set i ett av renrummen med 3 laryngoskopsblad (3 storlekar), att ta från när något blad är använt och diskas.

På NIVA finns det 2 kompletta set videolaryngoskop (C-MAC) i 3 storlekar. Dessa 2 finns i gången in till kompakten.

Användarbeskrivning:

- Sätt i elkontakten i ett eluttag.
- Anslut undersökningskabeln till uttaget på videolaryngoskopet. Markeringar på kontakten och uttaget förenklar anslutningen. Se till att anslutningskabelns kontakt trycks in så långt det går. Något glapp får inte synas.
- Anslut undersökningskabeln från videolaryngoskopet till kontakten på monitorn, pil-markering mot pil-markering. Observera att det finns 2 uttag på monitorn. Båda uttagen kan användas till samma syfte.

- Sätt på monitorn genom att trycka på strömbrytaren. Den gröna kontrollampan på monitorn och den blåa funktionsknappen på videolaryngoskopet tänds. Nu är den färdig att användas.
- Stillbildstagnning och videoinspelning kan aktiveras med multifunktionsknappen (bild 1) på videolaryngoskopet. När knappen lyser blå, visas samtidigt en blå markering några sekunder på monitorn. Det går nu att ta bilder och spela in filmer.
- **Stillbildstagnning:** Kortvarig tryckning på multifunktionsknappen.
- **Filminspelning:** Startas genom att hålla in knappen i ca 2 sekunder, och stoppas med en kort knapptryckning igen. Bilder och filmer sparas i SD-minneskortet som sitter i monitorn. Bilder och filmer raderas genom att hålla in knappen vid symbolen för en papperskorg.



Funktionsknapp

Bild 1

Rengöring

- Koppla bort anslutningskabeln från monitorn och videolaryngoskopsbladet. Rengör sladden noggrant med ytdesinfektion.
- Videolaryngoskopet rengörs först manuellt med diskborste och vatten.
- Första val för rengöring är i **Endoskopidesinfektor Wassenburg**. Använd alltid tillhörande skyddspropp (flergångs) för att skydda kontakten under rengöringsprocessen (bild 2). Placera videolaryngoskopet i diskorgen i det vänstra facket (bild 3) och starta maskinen. Efter diskningen är det viktigt att inspektera videolaryngoskopet så att det är rent, torrt och oskadat. Ta bort skyddsproppen och lägg tillbaka i den gröna lådan på hyllan märkt ”proppar”. Om kemikalierester eller annan smuts finns kvar måste skåpet rengöras manuellt samt diskas igen.
- **Diskdesinfektorn** kan användas vid ovana kring hur endoskopidesinfektor Wassenburg används. (NIVA använder Diskdesinfektorn).

- Använd alltid tillhörande skyddspropp för att skydda kontakten under rengöringsprocessen (bild 2). Placera videolaryngoskopet i diskkorgen och starta maskinen omgående. Efter diskning kan videolaryngoskopet torka i värmeskåp utan skyddspropp. På NIVA torrblåser vi kontakten med tryckluft i rena sköljen.
- Släng plastpåsen och tvättlappen där det använda videolaryngoskopet legat. Sprita av ställningen. Sätt dit en ny plastpåse och en torr tvättlapp i den nedre korgen, samt en ny plastpåse över den övre korgen för att skydda de rena bladen. Ställ tillbaka i renrummet.

Bild 2: Skyddspropp



Bild 3: Wassenburg endoskopidesinfektor



Granskare/arbetsgrupp

Frida Mattsson Teknikansvarig intensivvårdssjuksköterska, CIVA/avd 96, Omr 5, SU

Jenny Andersson Teknikansvarig intensivvårdssjuksköterska, CIVA/avd 96, Omr 5, SU

Miriam Hallin undersköterska och Förrådsansvarig, CIVA/avd 96, Omr 5, SU

Eva Jägheden Teknikansvarig intensivvårdssjuksköterska, NIVA/avd 35, Omr 5, SU

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård
Sahlgrenska, Postoperativ vård Sahlgrenska,
Neurointensivvårdsavdelning, Central intensivvårdsavdelning,
Avdelning 95B postoperativ vård, Avdelning 95A postoperativ
vård, Avdelning 22 postoperativ intensivvård

Innehållsansvar: Per Persson, (perpe8), Överläkare

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-1668

Version: 6.0

Giltig från: 2026-04-13

Giltig till: 2027-01-26