

Gäller för: Transplantationscentrum

Giltig från: 2025-10-01

Innehållsansvar: Jesper Magnusson, (jesma10), Universitetssjukhusöverläkare

Giltig till: 2027-09-03

Granskad av: Jesper Magnusson, (jesma10), Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Rengöring av andningsmasker - transplanterad patient

PEP-MUNSTYCKE

- Plocka isär munstycke, ventilhus och motstånd. Kör dem i diskdesinfektorn. Alla delar ska lufttorka innan de sätts ihop.
- Rengöring av nattpersonal 1 gång/dygn.

PEP-MASK

- Plocka isär motstånd och ventilhus från masken, alla delar rengörs i diskdesinfektorn.
- Liksom motstånd och ventilhus som plockas isär.
- Alla delar ska lufttorka innan de sätts ihop.
- Rengöring av nattpersonalen 1 gång/dygn.
- Alla masker och delar rengöres mellan varje patient.
- Viktigt att motståndet hamnar i ”rätt ben”. Se separat checklista hos respektive patient.

CPAP

- CPAP-generatoren och TED-mätaren rengöres vid behov med fuktig engångsduk/M-tork.
- Slangar (flergångs och förbindelserör) körs i diskdesinfektor var 3:e dag. Monteras på nippel i maskinen så att de genomspolas. Torkas hängande i torkskåp.
- Slang-adapter diskas i diskdesinfektor var 3:e dag.
- Masken rengörs med tvållösning, torkas torr med M-tork, och smittrenas därefter med Ytdesinfektion 70. Låt lufttorka.
- Masken rengöres av nattpersonal 1 gång/dygn

- Yttre filter byts 1 gång/dygn
- Textilhätta tvättas i diskdesinfektor. Plasthätta rengöres med Ytdesinfektion 70. Låt lufttorka.

INHALATIONSUTRUSTNING

Airlife Cardinal Health

- Efter varje inhalation ska inhalationskoppen tömmas. Får inte rengöras i vatten.
OBS endast koppen byts av nattpersonalen 1 gång/dygn, ej hela inhalationssetet.
- Masken är en-patient. Rengöring med tvällösning, torka torrt med M-tork därefter smittrening med Ytdesinfektion 70. Byts vid behov.
- T-stycke med ventil, om det blivit kladdigt av läkemedel kan det sköljas och rengöras under rinnande ljummet vatten. Använd ej diskborste då denna kan repa insidan.
Låt lufttorka eller torka med mjuk duk. Får ej rengöras i diskmaskin eller diskdesinfektorn.

Ailos Nebulisator

- Rengöring av sladd, slang och kompressor med Ytdesinfektion 70.
- Efter varje inhalation ska inhalationskoppen tömmas. Får inte rengöras i vatten. Är medicinkoppen kladdig ska den diskas i diskdesinfektorn.
- Alla delar plockas isär, diskas i diskdesinfektorn. Låt lufttorka innan de sätts ihop.
- Rengöring utförs av nattpersonalen 1 gång/dygn.

e-Flow

- Sladden torkas av med Ytdesinfektion 70
- Direkt efter varje inhalation ska alla delar tas isär och rengöras i diskdesinfektorn pga läkemedel förstör delarna. Låt lufttorka innan delarna sätts ihop. Får inte rengöras i vatten.
- Filter byts efter varje inhalation

NÄSGRIMMA FÖR SYRGAS

Intersurgical

- Engångs, bytes varje dag av nattpersonalen kl 06.00
- Bör ha en upphängningsanordning 40 cm ovan golvet. Byts om den ramlat ner.
- Om befuktning används ska flaskan rengöras i diskdesinfektorn dagligen. (Aqua-pack sterilt vatten, engångs, rekommenderas.)

ANDNINGSMASK FÖR SYRGAS

Airlife Cardinal Health

- Masken är en-patients.
- Masken rengöres dagligen med tvållösning, torka torrt med M-tork. Därefter smittrening med Ytdesinfektion 70. Låt lufttorka.
- Bör ha en upphängningsanordning 40 cm ovan golvet.
- Om befuktning används ska flaskan rengöras i diskdesinfektorn dagligen. (Aqua-pack sterilt vatten (engångs) rekommenderas.)

Källa:

Tidigare rutin CPAP och PEP-mask

Bruksanvisning från tillverkaren

Lotta Helgius, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, SU/S

Annika Berglund, sjukgymnast, Transplantationscentrum, SU/S

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Transplantationscentrum

Innehållsansvar: Jesper Magnusson, (jesma10),
Universitetssjukhusöverläkare

Granskad av: Jesper Magnusson, (jesma10),
Universitetssjukhusöverläkare

Godkänd av: Niclas Kvarnström, (nickv1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-207

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-01

Giltig till: 2027-09-03