

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Patrik Martner, (patma2), Överläkare
Granskad av: Mattias Gyllsdorf, (matgy1), Sektionsledare
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-09-05

Giltig till: 2027-09-05

Hantering av steril utrustning för Prehospital Intensivvårdsenhet (PIV)

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Syfte

Ge PIV möjlighet att sterilisera utrustning hos sterilcentralen (STC) med hjälp från operation 1 SU/Östra.

Bakgrund

PIV genomför prehospitalt återkommande torakostomier och någon gång per år anläggs thoraxdrän. PIV har också möjlighet till nödamputation och perimortemsectio. Ingreppen ovan kräver kirurgisk utrustning med varierande krav på sterilitet. Eftersom PIV enbart har möjlighet till handdisk har vi istället valt att sterilera alla instrument via STC.

Kirurgisk steril utrustning fördelad respektive ingrepp

Thorakostomi (dubbla uppsättningar finns i bilen):

- 1 st 3275-24HP Peang Crafoord, böjd svensk modell, 24 cm.

Thoraxdränage (ett extra set finns i PIV-förråd på SU/Ö):

- 1 st 3275-24HP Peang Crafoord, böjd svensk modell, rak 24 cm.
- 1 st BH450R Peang Rochester Pean, rak 240 mm.
- 1 st BM065E Durogrip Nålförare Hegar-Mayo 150 el 180 mm.

- 1 st 1261-15HP Sax Mayo-Stille. Böjd Höoglans Polerad 15 cm.

Suturset (ett extra set finns i PIV-förråd på SU/Ö):

- 1 st BM065E Durogrip Nålförare Hegar-Mayo 150 mm.
- 1 st 1261-15HP Sax Mayo-Stille. Böjd Höoglans Polerad 15 cm.
- 1 st Pincett.

Perimortemsectio:

- 1 st 1251-17M Sax Mayo, Böjd med supercut 17 cm.
- 5 st 3275-24HP Peang Crafoord, böjd svensk modell, rak 24 cm.
- 5 st Handduksklämma Bachouse.
- 1 st Rondskål.

Nödamputation:

- 1 st BH447R Peang Rochester Pean, böjd 200 mm.
- 2 st Peang Crile böjd 140 mm.

All utrustning steriliseras efter användning. Thoraxdränageset steriliseras även årligen vecka 2 för att garantera sterilitet.

Hantering efter användning:

Efter användning lämnas instrumenten i kompletta set enligt listan ovan och hanteras enligt följande lista:

- Instrumenten grovrengörs med vanlig handdisk och torkas och läggs i en plastpåse.
- Avlämning sker på operation 1 genom att kontakta bryggtelefon 031-3434865 och meddela att vi har instrument som ska till STC.
- För att STC ska kunna identifiera PIV som ägare bifogas laminerad lapp innehållande PIVs namn samt vilket set som ska steriliseras.
- Instrumenten skickas efter sterilisering åter till operation 1 som ringer PIV-sköterska på nummer 079-5518990 och meddelar att upphämtning kan ske.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Patrik Martner, (patma2), Överläkare

Granskad av: Mattias Gyllsdorf, (matgy1), Sektionsledare

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-3527

Version: 1.0

Giltig från: 2025-09-05

Giltig till: 2027-09-05