

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra
Innehållsansvar: Martin Jonsson, (marjo255), Ivasjuksköterska
Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-22

Giltig till: 2027-01-10

Apparatfilter (bakterier och virus), Servo-U

Revideringar i denna version

2024-09-24 Uppdaterad formatmall




Bakgrund

Ventilator Servo-U ska alltid vara utrustad med ett apparatfilter (bakterie/virusfilter) mellan expirationsslangen och expirationskassetten. Apparatfiltret skyddar patienten, sjukvårdspersonal och känslig mätutrustning mot bakterier och virus.

Filtret skall under pågående ventilation bytas regelbundet för att förhindra blockering av filtret. Ökning av patientens luftvägstryck och minskad expiratorisk tidalvoym kan vara orsakad av att filtret har blockerats. Blockering kan i värsta fall leda till att patienten inte kan andas ut.

Vid svårt lungsjuka patienter kan endotrakealtuben behöva klampas innan filtret byts.

Fortsättning nästa sida.

Alternativ	Filtersort	Bytesfrekvens	Tidpunkt
Passiv befuktning och inga inhalationer		1 ggr/dygn	Morgon
Passiv befuktning och inhalationer ≤ 6 /dygn	Clear-Guard Midi	1 ggr/dygn	
Passiv befuktning och inhalationer > 6 /dygn		1 ggr/dygn	
Aktiv befuktning + inhalationer ≤ 6 /dygn		1 ggr/dygn	Morgon
Aktiv befuktning och Inhalationer > 6 /dygn, alt. kontinuerlig inhalation		2 ggr/dygn	Morgon och kväll

Dokumentation

- Märk filtret med datum och klockslag vid bytet.
- Dokumentation sker i pärmen för arbetsrutiner vid patientplats.

Referenser

- Användarmanual Clear-Guard mini. Intersurgical.

Ansvar

Personal på Intensivvård och postoperativ vård Östra ansvarar för att arbeta utefter denna rutin. Vårdenhetschefen/ Vårdenhetsöverläkaren ansvarar för att rutinen är känd och följs. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar och lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschefen, Vårdenhetsöverläkaren har ansvaret för att rutinen följs upp, utvärderas och revideras. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga avvikelser från rutin rapporteras i Med Control PRO.

Granskare/arbetsgrupp

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

Innehållsansvar: Martin Jonsson, (marjo255), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Martin Hubrich, (marhu11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9805-1593997-549

Version: 12.0

Giltig från: 2025-08-22

Giltig till: 2027-01-10