

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehållsansvar: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare
Granskad av: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare
Godkänd av: Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11

Hjärtstartare Huvudentré Sahlgrenska sjukhuset

En halvautomatisk defibrillator finns placerad i huvudentrén på respektive sjukhuskropp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en skylt markerar var hjärtstartaren är placerad. Den står i ett larmat skåp och är tillgänglig även för allmänheten under öppettiden. (Publik)

Reviderad 2023-11-23

Syfte

Att möjliggöra snabb defibrillering i och i närheten av huvudentrén

Ansvar

- **Medarbetare:** Slår larm om hjärtstopp via interntelefon **3 90 90** alternativt mobiltelefon **031-343 90 90** och startar omedelbart Hjärt-Lungräddning (HLR) enligt gällande riktlinjer. Om det gäller ett barn skall detta uppges vid larmet.
- **Växeln:** Tar emot samtalet och larmar ut larmteamet enligt gällande larmrutin för respektive sjukhuskropp.

Utrustning i defibrillatorväska

Hjärtstartare, 1 st. extra batteri, 1 st. extra elektrod, barnnyckel, sax eller S-Cut, Pocketmask och kompresser.

Sahlgrenska sjukhuset

- **Akutvaktmästarna:**
Återställer hjärtstartaren enligt gällande rutin efter användande på patient. De gör en **användarinitierad test** och kompletterar med utrustning enligt nedan.
- **Medarbetare receptionen huvudentrén:**
Tillser att den gröna lampan på hjärtstartaren blinkar och dokumenterar i härför avsedd lista. Kontrollen genomförs 1 gång/dygn (vardagar), Om lampan inte blinkar tas kontakt enligt nedan.

När hjärtstartaren/skåpet larmar eller när lampan inte blinkar kontakta

- **Dagtid-** i första hand HLR-centrum tel. **031-342 75 55, 2 75 75, 2 97 29** alternativt växeln.
- **Jourtid-** Akutvaktmästarna tel. **031-342 72 94**

Östra sjukhuset

- **Larmteamet:**
Återställer hjärtstartaren efter användande på patient. De gör en **användarinitierad test** och kompletterar med utrustning enligt nedan.

- **Medarbetare receptionen huvudentrén:**
Tillser att den gröna lampan på hjärtstartaren blinkar och dokumenterar i härför avsedd lista. Kontrollen genomförs 1 gång/dygn (vardagar),
Om lampan inte blinkar åtgärdar de själva eller tar kontakt enligt nedan.

När hjärtstartaren/skåpet larmar eller när lampan inte blinkar kontakta

- **Dagtid-** i första hand receptionen huvudentrén tel. **031-343 50 38**, HLR-enheten, tel. **031-343 57 46**, **alternativt växeln.**
- **Jourtid-** Akutvaktmästarna tel. **031-343 40 26** som kontaktar larmteamet tel. **031-343 80 29**

Mölnbalds sjukhus

Larmteamet:

- Återställer hjärtstartaren efter användande på patient. De gör en användarinitierad test och kompletterar med utrustning enligt nedan.

Medarbetare receptionen huvudentrén:

- Genomför daglig kontroll av hjärtstartare 1 gång/dygn (vardagar). De tillser att den gröna lampan blinkar och dokumenterar i härför avsedd lista. Om lampan inte blinkar åtgärdar de själva eller ta kontakt enligt nedan.

När hjärtstartaren/skåpet larmar eller när lampan inte blinkar kontakta

- **Dagtid-** i första hand medarbetare receptionen huvudentrén alt larmteamet Op1 tel. **031-343 11 35**
- **Jourtid -** Larmteamet Op.1 tel. **031-343 11 35**

Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus

- **Larmteamet (Vuxen):**
Återställer hjärtstartaren efter användande på patient. De gör en **användarinitierad test** och kompletterar med utrustning enligt nedan.
- **Medarbetare receptionen huvudentrén:**
Tillser att den gröna lampan på hjärtstartaren blinkar och dokumenterar i härför avsedd lista. Kontrollen genomförs 1 gång/dygn (vardagar),
Om lampan inte blinkar åtgärdar de själva eller tar kontakt enligt nedan.

När hjärtstartaren/skåpet larmar eller när lampan inte blinkar kontakta

- **Dagtid-** i första hand receptionen huvudentrén tel. **031-343 47 89**, HLR-koordinator PEDKTC **070-08 24 441** **alternativt växeln.**
- **Jourtid-** Akutvaktmästarna tel. **031-343 40 26** som kontaktar larmteamet tel. **031-343 80 29**

Relaterad information

www.hjartstartarregistret.se

Granskare

Gunilla Edholm, Instruktör HLR-centrum, Sahlgrenska sjukhuset
Gunilla Solton, HLR samordnare Pediatriskt KTC, Drottning Silvias barnsjukhus
Kjell Klint, HLR-samordnare, HLR-enheten Östra sjukhuset
Malin Hviid, HLR-samordnare, HLR-enheten Mölnbalds sjukhus

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare

Granskad av: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare

Godkänd av: Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-11

Version: 10.0

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11