

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef
Granskad av: Kian Chin, (kiach1), Överläkare
Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Giltig från: 2024-06-19

Giltig till: 2026-06-19

Vårdhygien – Loggbok med checklista för spol- och diskdesinfektor

Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa samt Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän.

Förändringar sedan föregående version

Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2022-08-23. Mindre komplettering avseende dagligt underhåll i checklista, enligt bilaga 1 och 2.

Syfte

Komplettera Vårdhandbokens kapitel [Desinfektionsapparatur](#) med loggbok för spol- och diskdesinfektor samt checklistor för daglig kontroll.

Arbetsbeskrivning

För varje spol- och diskdesinfektor ska det finnas en loggbok med dokumentation innehållande:

- Bruksanvisning/instruktionsbok.
- Checklista för dagligt underhåll av spol- och diskdesinfektor.
- Produktinformation om disk- och tork-/sköljmedel som används.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för årligt förebyggande underhåll.
- Protokoll från årligt förebyggande underhåll.
- Vid felanmälan dokumentera eventuella felkoder samt tidpunkt och signatur.
- Dokumentation av reparationsarbeten.
- Valideringsdokumentation till spol- resp. diskdesinfektor, utfärdat av leverantör.

Dagligt underhåll

Med dagligt underhåll avses underhåll de dagar som verksamhet pågår på enheten.

Checklista som ska ingå i loggboken kan utformas enligt förslag i bilagorna:

Bilaga 1. Checklista - Dagligt underhåll av diskdesinfektor

Bilaga 2. Checklista - Dagligt underhåll av spoldesinfektor

Ansvar och avsteg

- Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.
- Avsteg från denna rutin rapporteras i MedControl PRO eller befintligt avvikelshanteringssystem.

Relaterade dokument och kunskapsöversikt

Relaterade dokument

[Desinfektionsapparat](#). Vårdhandboken

Kunskapsöversikt

[Utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer](#). Svensk Förening för Vårdhygien – SFVH

Nedanstående SIS dokument är tillgängliga från VGR-dator. Sök via medicinska biblioteket - databaser - SIS.

- SIS teknisk rapport, SIS/TR 46 Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg
- SS EN ISO 15883 Europeisk standard för disk- och spoldesinfektor.

Arbetsgrupp

Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kian Chin, överläkare

Tove Windh, hygiensjuksköterska

Godkänt av

Capio Lundby Specialistsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Habilitering & Hälsa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Inger Holm Gunnarsson, chefläkare

Karin Möller, chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Anneli Fagerberg, chefläkare

Per Wiger, chefläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Kian Chin, (kiach1), Överläkare

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-131

Version: 3.0

Giltig från: 2024-06-19

Giltig till: 2026-06-19