

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Caroline Östergren Jørgensen, (caros8), Specialistläkare, ST

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2028-05-22

Vårdhygien – Loggbok med checklista för spol- och diskdesinfektor

Gäller även för Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa samt Sjukhusen i väster och är godkänd av respektive chefläkare. Kan även appliceras i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän.

Förändringar sedan föregående version

Ersätter tidigare version, senast uppdaterad 2024-06-19. Endast redaktionella förtydligande.

Syfte

Komplettera Vårdhandbokens kapitel [Desinfektionsapparat](#) med loggbok för spol- och diskdesinfektor samt checklistor för daglig kontroll.

Utförande

För varje spol- och diskdesinfektor ska det finnas en loggbok med dokumentation innehållande:

- Bruksanvisning/instruktionsbok.
- Checklista för daglig kontroll av spol- och diskdesinfektor.
- Produktinformation om disk- och tork-/sköljmedel som används.
- Kontaktuppgifter till ansvarig för årligt förebyggande underhåll.
- Protokoll från årligt förebyggande underhåll.
- Vid felanmälan dokumentera eventuella felkoder samt tidpunkt och signatur.
- Dokumentation av reparationsarbeten.
- Valideringsdokumentation till spol- resp. diskdesinfektor, utfärdat av leverantör.

Daglig kontroll

Med daglig kontroll avses kontroll de dagar som verksamhet pågår på enheten.

Checklista som ska ingå i loggboken kan utformas enligt förslag i bilagorna:

Bilaga 1. Checklista – Daglig kontroll av diskdesinfektor

Bilaga 2. Checklista – Daglig kontroll av spoldesinfektor

Avsteg

Avsteg från denna rutin rapporteras i MedControl PRO eller befintligt avvikelshanteringssystem.

Ansvar

Linjechefer ansvarar för att denna rutin är känd och följs av alla medarbetare.

Relaterade dokument och kunskapsöversikt

Relaterade dokument

[Desinfektionsapparat](#). Vårdhandboken

Kunskapsöversikt

[Utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer](#). Svensk Förening för Vårdhygien – SFVH

Nedanstående SIS dokument är tillgängliga från VGR-dator. Sök via medicinska biblioteket - databaser - SIS.

- SIS teknisk rapport, SIS-TR 46:2014. Processer för rengöring, desinfektion och sterilisering – Validering och rutinkontroll inom svensk vård och omsorg
- SS EN ISO 15883 Europeisk standard för disk- och spoldesinfektor.

Arbetsgrupp

Representanter arbetsgrupp Vårdhygien Sahlgrenska

Universitetssjukhuset

Kerstin Möller, hygiensjuksköterska

Caroline Östergren Jørgensen, hygienläkare

Godkänt av

Capio Lundby Specialistsjukhus

Carlanderska sjukhuset

Habilitering & Hälsa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Inger Holm Gunnarsson, chefläkare

Karin Möller, chefläkare

Anne-Berit Ekström, chefläkare

Anneli Fagerberg, chefläkare

Philipp Meijering, chefläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvar: Nahid Kondori, (nahko1), Enhetschef

Granskad av: Caroline Östergren Jørgensen, (caros8),
Specialistläkare, ST

Godkänd av: Anneli Fagerberg, (annfa26), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-131

Version: 5.0

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2028-05-22