

# Rörpost, Alingsås lasarett

Rutinen beskriver hur rörpost ska skickas på ett säkert sätt.

## Arbetsbeskrivning

Rörposten används för att skicka vissa prover från vårdavdelningar och akutmottagning till laboratoriemedicin.

## Instruktion

Rörpost går att skicka dygnet runt, men mellan kl. 02.00-07.00 är det endast akuta prover och då måste lab. ringas på anknytning 6324.

Prover som tas före kl. 07.00 på morgonen som ska analyseras efter kl. 07.00 kan skickas i rörpost från kl. 06.30. Det är viktigt att proverna inte är tagna före kl. 06.00.

I rörposten behöver inte proven särskiljas om de är akuta.

## Packningsinstruktion

**Gul patron** har insats för att skicka provrör enligt bild. OBS inga andra rör än de på bilden får skickas i gul patron!



Provrören trycks ner i hålen så långt tills det känns att de sitter fast. Det går bra att sticka ner två korta rör i samma hål.

**I röd patron** skickas övriga prover, microtainerrör samt provrör med pappersremiss.

Dessa prover packas i avsedda plastfickor. Stoppa i rören i fickorna, lägg i pappersremiss, rulla ihop plastfickan med remissen utåt och fäst ett gummiband ett varv runt. Endast en plastficka i varje patron!



## **Följande prover får inte skickas med rörpost utan måste lämnas manuellt till laboratoriemedicin:**

- Spinalvätska
- Syrabas/Blodgas
- Ledvätska
- Pleuravätska
- Ascites
- Koagulationsutredningar
- Laktat
- Quantiferon

### **Felanmälan**

Västfastigheter ansvarar för driften av rörposten, vid fel kontakta dem via felanmälan i weblord.

## **Lathund – Rörpoststation ATX**

### **SÄNDNING**


1. Packa och förslut patron väl.
2. Ställ på patron, välj en snabbvalsadress och därefter tryck på

#### **Start:**

1. Kemlab - Gul patron
  2. Kemlab - Röd patron
  3. Med. 5
  4. Med. 7
  5. Med. 9
  6. Akuten
  7. IVA
  8. Ortopediavd.
  9. Kirurgiavd.
3. Bokning utförs. Grön lysdiod tänds.
  4. Sändningen startar omedelbart om systemet är ledigt, annars ställs den i en sändningskö och startas när den står i tur. Grön lysdiod blinkar i långsam takt under sändning, ca en blinkning per sekund.

## MOTTAGNING

1. Gul lysdiod blinkar i långsam takt när patron är på väg till denna station.
2. Mottagen patron hamnar i ankomstkorgen under stationen.

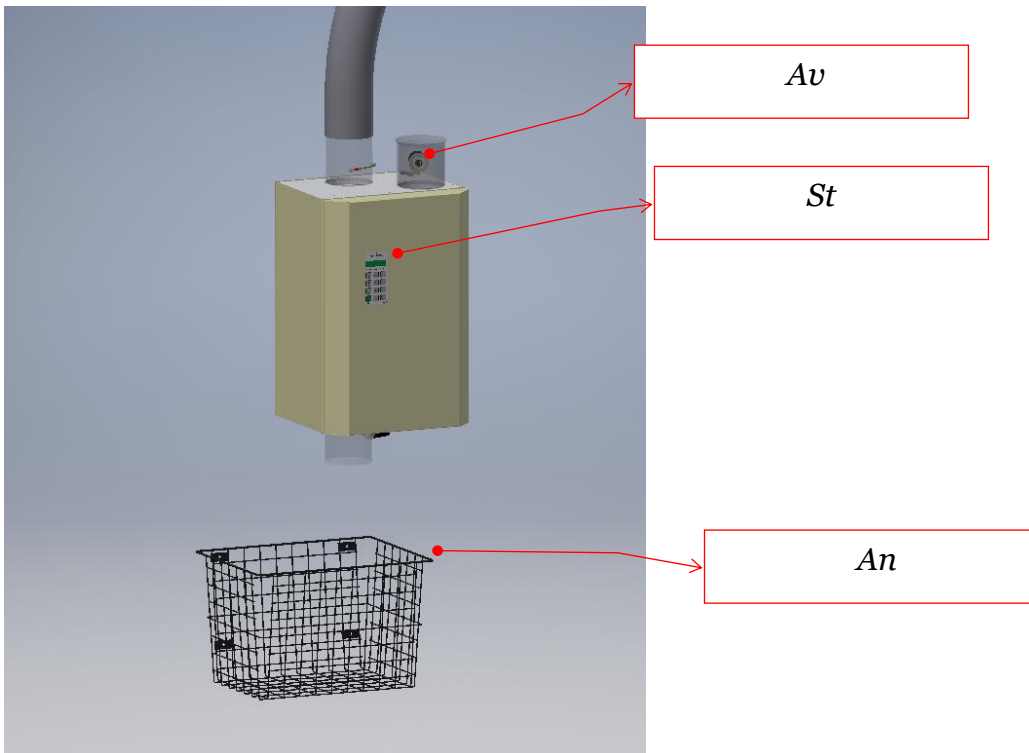

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Alingsås Lasarett

**Innehållsansvar:** Anna Bernvik, (annbe130),  
Verksamhetsutvecklare

**Godkänd av:** Petra Dannapfel, (petda23), Utvecklingschef

**Dokument-ID:** SV9024-2108058916-198

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-09-09

**Giltig till:** 2027-08-28